

Löffelreiniger



UNIGLOVES®
KEEPING YOU SAFE

Eigenschaften

- sehr Material schonend
- Ultraschallbad geeignet
- schnelle und sehr gute Reinigungsleistung auch bei Adhäsiven
- biologisch abbaubar und Hochkonzentrat
- angenehmer Geruch

Anwendungsgebiet

Der Löffelreiniger ist ein Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten im Dental-Bereich. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol Pasten, Carboxylat- und Phosphatzementen sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse.

Auch Abform-Adhäsive, die die Abformmaterialien mit dem Löffel verkleben, werden mit abgelöst. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

Anwendungshinweise

Der Löffelreiniger wird 5-10%ig angewandt und kann bei sehr starker Verschmutzung auch als Konzentrat pur verwendet werden. Es werden ca. 1-2 volle Dosierkammern pro Liter warmen Wasser zugegeben. Die verunreinigten Teile werden je nach Verschmutzungsgrad für mind. 45 Min eingelegt. Die Lösung kann zur Beschleunigung auch im Ultraschallbad eingesetzt werden (Empfehlung). Der Spezialreiniger ist für nichtrostende Gegenstände geeignet. Chrom-Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden. Korrosionsgefahr!

Zusammensetzung

Zwischen 5% und 15% anionische Tenside, zwischen 15% und 30% Na-NTA, Komplexbildner, Additive, Duftstoffe

chemisch-physikalische

Daten

Optik	transparente Flüssigkeit
Dichte	1,09g/cm ³
pH- Wert	10 - 11
Farbe	dunkelgelb

Artikelnummer Lieferformen

- REF 97-705 5 Liter

Lieferant

UNIGLOVES®
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf-Spich

+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de

Einwirkzeiten

Die Einwirkzeit ist zwischen 45 und 60 Minuten.

Präparatetyp

Spezialreiniger zur Reinigung von Abformlöffeln
und Instrumenten im Dental-Bereich.

Sicherheitshinweise

R 10 Entzündlich. R 38 Reizt die Haut. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. S 16 Von Zündquellen fernhalten -
Nicht rauchen. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. S 37/39 Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.



Achtung